

Chlorine Disinfection + Detergent

Engangsklude med aktivt klor



Varenr.: 25074



Varenr.: 25058

Bredspektret

Effektiv mod alle virus

Virker mod clostridium difficile

Altid korrekt dosering

Wet Wipe Chlorine Disinfection engangsklude er imprægneret med klorgranulat

Med Wet Wipe Chlorine Disinfection opnår du en optimal og enkel desinfektion. Pakken indeholder en brudbar pose med demineraliseret vand. Når posen anbrødes, løber vandet ned i kludene, hvor væsken opløser klorgranulatet, som omdannes til aktivt klor. Kludene er klar til brug efter 7 minutter.

Anvendelsesområder

Anvendes til desinfektion af overflader, og kontaktpunkter på forskelligt udstyr. Desinficerer mod vegetative bakterier, gærsvamp, alle virus og Clostridium difficile sporer på 5 min. Effektiv mod norovirus på 5 min.

EN standard

Testmetode		tid
EN 13727	Bakterier	5 min
EN 13624	Gær	5 min
EN 16615	Bakterier og gærsvampe	5 min
EN 14348	Myko- og tuberkelbakterier	15 min
EN 14476	Virus	5 min
EN 17126	Clostridium difficile	5 min

Wet Wipe Chlorine Disinfection er revurderet af CEI 6. Nov 2014. CEI har vurderet, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at Wet Wipe Chlorine Disinfection kan vurderes som et bredspektret desinfektionsmiddel med maksimal desinfektionseffekt.

Wet Wipe A/S

Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

Engangskludene produceres i to størrelser; maxi og mini.

Varenr. 25074: Chlorine Disinfection Maxi

Karton á 24 pakker

1 pakke indeholder 5 klude, 43×30 cm

Varenr. 25058: Chlorine Disinfection Mini

Karton á 20 pakker

1 pakke indeholder 10 klude, 30×20 cm

Indhold granulat

100 % natrium dichloroisocyanurate dihydrate

Indhold aktiverede og brugsklare klude

Aktivt klor > 1000ppm

pH 5-6

Bemærk

De aktiverede og brugsklare engangsklude bevarer desinfektionseffekten op til 7 dage efter aktivering. Kludene produceres i to størrelser.

Produceret i Tyskland. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

Husk altid at læse brugsvejledningen før brug.

Desinfektionsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

74-059, DK/DA, Ver 12
April 2024

wetwipe[®]
by schülke →